

MESOKIT PERFUSEUR Dr GUEZ - Dr STROUK

Références produits : PR0001-PR0002-PR0003-PR0004-PR0073-PR0074-PR0075-PR0076

INDICATION :

- Ces dispositifs sont des tubulures de perfusion par gravité destinées à l'hydrotomie percutanée.

PRECAUTIONS D'EMPLOI :

- Ce dispositif médical doit être utilisé dans des conditions d'asepsie appropriées.
- Le kit est stérile et à USAGE UNIQUE EXCLUSIVEMENT, la réutilisation de ce dispositif remet en cause sa stérilité, peut générer des dysfonctionnements et conduire à une contamination croisée.
- Les injections doivent être effectuées dans une peau saine, non inflammatoire et rigoureusement désinfectée.
- Avant toute utilisation, vérifier l'intégrité de l'emballage et la date de péremption du kit.
- La solution pour perfusion doit être injectée lentement. La quantité à injecter dépend de la zone à traiter et de la correction souhaitée.

AVANT D'UTILISER VOTRE KIT :

- Avant d'utiliser le MESOKIT PERFUSEUR -Dr GUEZ -Dr STROUK, lisez et suivez attentivement les instructions étape par étape. Conservez ce manuel d'utilisation et consultez-le en cas de besoin.
- Les composants doivent être utilisés dès l'ouverture du blister.
- Le soin doit être effectué conformément à la prescription médicale, dans le respect des règles d'asepsie et selon les règles de bonne pratique.

MODE D'EMPLOI :

1. Installer confortablement le patient, après avoir repéré au feutre les points d'injection.
2. Se désinfecter les mains par friction avec une SHA (solution hydro-alcoolique).
3. Réaliser une antiseptie cutanée large, avant d'insérer les aiguilles.
4. Mettre des gants de soins non stériles à UU.
5. Introduire les aiguilles selon un angle de 30 à 45°, en maintenant le tissu sous-cutané entre le pouce et l'index.
6. Brancher la ligne de perfusion préalablement purgée, adapter la tubulure et suspendre la poche sur un pied à sérum. Ouvrir doucement la molette en vérifiant le bon écoulement du soluté.
7. S'assurer que le passage du soluté n'entraîne pas de douleur ou de brûlure au patient (à noter : un léger gonflement de la zone au démarrage est normal).
8. Régler le débit de la perfusion selon la prescription médicale
9. Fixer les voies en les recouvrant d'un pansement occlusif transparent stérile.
10. Déclamer la perfusion et ajuster le débit.
11. Eliminer le matériel souillé de sang dans un collecteur à déchets à risque infectieux.
12. Enlever les gants.
13. Se désinfecter les mains par friction avec une SHA.
14. Tracer sur le dossier du patient la date, l'heure, le type de kit et le site d'insertion.
15. Lorsque la poche de soluté est vide, se désinfecter les mains par friction avec une SHA et enfiler des gants de soins non stériles à UU, puis retirer les aiguilles et les éliminer dans un collecteur à déchets à risque infectieux.



19, allée de la lavande - 44250 Saint-Brévin-les-Pins

✉ contact@newcurediffusion.com - 🌐 <https://newcurediffusion.com>

 ROMEPLA S.A.M.
9 avenue Albert II
98000 MONACO

 0459

Date d'apposition du marquage CE : 2001

STERILE EO

